

Comprobación del funcionamiento del contenedor para esterilización Aesculap Aicon®

Antes de cada uso, compruebe visualmente que los componentes del contenedor para esterilización no presenten daños y funcionen correctamente. Para garantizar un funcionamiento correcto, se deben seguir las instrucciones de uso TA015495-ES en todo momento. Si no tiene acceso a la última versión de las instrucciones de uso, contacte con AESCULAP®.


1. COMPRUEBE LA TAPA



y Compruebe que no haya mellas ni deformaciones.



y Compruebe la junta (debe estar intacta).

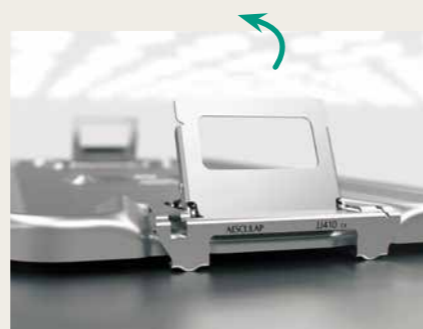

y Compruebe que el mecanismo de cierre sea completamente funcional.


2. COMPRUEBE EL SOPORTE DEL FILTRO



y Compruebe que no haya mellas ni deformaciones.



y Compruebe la junta (debe estar intacta).

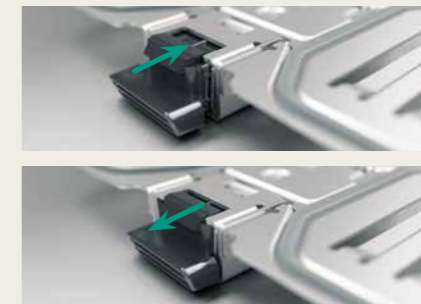

y Pulsador del soporte del filtro completamente funcional.

3. COMPRUEBE LA CUBETA



y Inserte un filtro nuevo (sin dobleces, agujeros ni grietas).



y Verifique que el soporte del filtro encaje de forma audible en su sitio. Debe mantener un contacto total y uniforme con la superficie.



y Compruebe que no haya mellas ni deformaciones.



y Compruebe que no haya mellas ni deformaciones en el borde del contenedor.

4. INSPECCIONE EL SISTEMA EDS




y Retire el escape de condensación para inspeccionarlo.



y Escape de condensación intacto. Juntas (carcasa y fuelle) intactas.



y Coloque el escape de condensación en su sitio (encaja a presión).

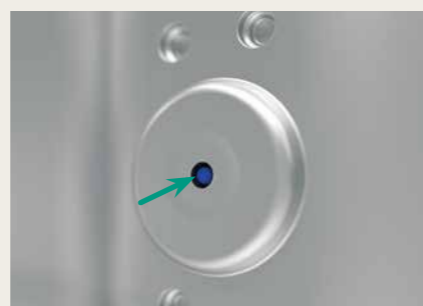

y El punto azul indica desde fuera que el escape de condensación está en su sitio.

5. CONTENEDOR LISTO PARA USAR



y Cierre y precinte el contenedor. Utilice únicamente contenedores no dañados. Si algún componente está dañado, sustitúyalo por una pieza de repuesto o hágalo reparar de inmediato.



y Contenedor para esterilización listo para usar.

TAMBIÉN DISPONIBLE EN VÍDEO



¿Cómo hacer la comprobación del funcionamiento? Escanee el código para ver un breve vídeo.